


# Guía de instalación del implante


## Preparación



1. Despegue la etiqueta por la parte perforada y guárdela como documentación y para la comunicación con su equipo restaurador.

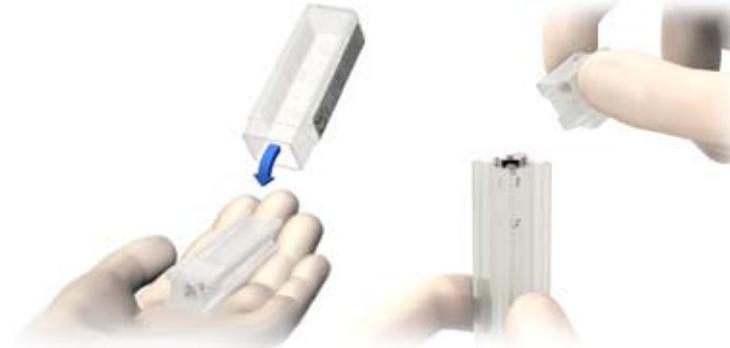

2. Tire del precinto que protege el compartimento estéril. Deposite el contenedor interno en una zona estéril. Quite el tapón para exponer el implante.

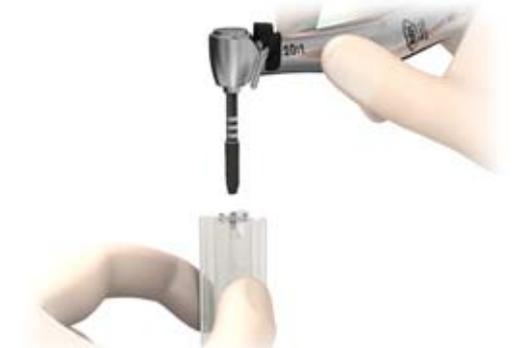

3. Conecte el driver de implante correspondiente al contraángulo. Insértelo en el implante y con una fricción adecuada levante el implante del contenedor, asegurándose de que el driver está correctamente asentado.

## Instalación



4. Instale el implante con contraángulo a baja velocidad (25rpm), con un torque máximo de 35 Ncm y bajo irrigación profusa. Deje que el implante se vaya introduciendo por sí solo en la osteotomía y evite aplicar una fuerza excesiva.



5. Puede utilizar la llave de carraca, en combinación con el mango para driver, para el asentamiento final del implante. Para nivelar el implante utilice una fuerza digital ligera.



6. Posicione el implante a nivel del hueso marginal o ligeramente por debajo de éste. Para facilitar el óptimo posicionamiento del pilar escogido, sitúe una de las superficies planas del driver de implante hacia vestibular. Libere el driver de implante con un ligero movimiento de lado a lado.

