

# Guía de Torques

## Fuerzas de torque recomendadas

Producto		Torque – Ncm		
		<span style="color: yellow;">●</span> X-estrecha	<span style="color: teal;">●</span> Estrecha	<span style="color: purple;">●</span> Ancha
Tornillo de cierre		Manual*	Manual*	Manual*
Pilar Cicatrización Estético Pilar Cicatrización Recto Tapa ProHeal Tapa de cicatrización PA		Manual**	Manual**	Manual**
TempDesign™		–	15	15
Pilar Temporal		15	15	15
Pilar Cresco™ 20°/45° para el Astra Tech Implant System™		–	15	15
Pilar Recto 20°/45°		–	15	15
Tornillos de retención Tornillo de retención Cresco™		–	15	15
Atlantis™ para el Astra Tech Implant System™ ZirDesign™ TiDesign™ CastDesign™ Pilar Angulado		15***	20	25
Pilar Directo Pilar Bola Pilar Locator™		–	25	25

\* Sólo fuerza digital ligera (5–10 Ncm) utilizando un destornillador manual o contraángulo a 25 rpm con torque de 5-10 Ncm.

\*\* Sólo fuerza digital ligera (5–10 Ncm) utilizando un destornillador manual. No utilizar la llave de torque o carraca.

\*\*\* Nota: disponibilidad únicamente de pilares TiDesign™, pilares Atlantis™ en titanio y titanio dorado (GoldHue™).