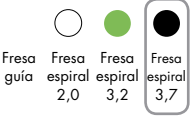



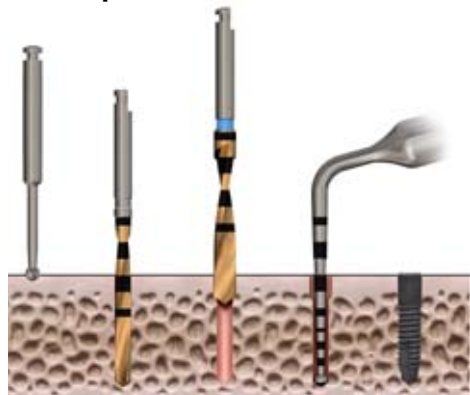
# Resumen de la secuencia de fresado OsseoSpeed™ TX

Implantes	Secuencia de fresado hueso poco denso	Secuencia de fresado estándar	Secuencia de fresado hueso denso
 <b>OsseoSpeed™ TX 3,0 S</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 Fresa cortical 2,7/3,0 Fresa espiral 2,85</p>
 <b>OsseoSpeed™ TX 3,5 S</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 Fresa espiral 3,2</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa cortical 3,2/3,5 Fresa espiral 3,35</p>
 <b>OsseoSpeed™ TX 4,0 S</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa cortical 3,7/4,0 Fresa espiral 3,85</p>
 <b>OsseoSpeed™ TX 4,5</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 Fresa cónica 2,7/4,5</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa cónica 3,2/4,5</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa cónica 3,2/4,5 Fresa espiral 3,35</p>
 <b>OsseoSpeed™ TX 5,0</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa cónica 3,2/5,0</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa cónica 3,7/5,0</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa cónica 3,7/5,0 Fresa espiral 3,85</p>
 <b>OsseoSpeed™ TX 5,0 S</b>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa espiral 4,2 Fresa espiral 4,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa espiral 4,2 Fresa espiral 4,7</p>	 <p>Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa espiral 4,2 Fresa espiral 4,7 Fresa cortical 4,7/5,0 Fresa espiral 4,85</p>

 = El recuadro indica que la fresa debe usarse solo en el hueso cortical, no debe usarse en toda la profundidad de la osteotomía.

# Secuencia de fresado – hueso poco denso

## OsseoSpeed™ TX 3,0 S




Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 OsseoSpeed™ TX 3,0 S 13 mm

## OsseoSpeed™ TX 3,5 S




Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 Fresa espiral 3,2 OsseoSpeed™ TX 3,5 S 13 mm

## OsseoSpeed™ TX 4,0 S

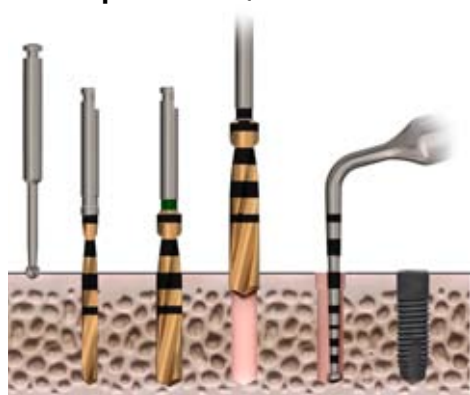


Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 OsseoSpeed™ TX 4,0 S 13 mm

## OsseoSpeed™ TX 4,5

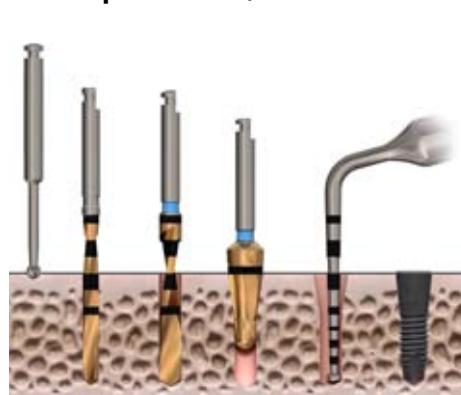


Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 2,7 Fresa cónica 2,7/4,5 OsseoSpeed™ TX 4,5 13 mm

## OsseoSpeed™ TX 5,0

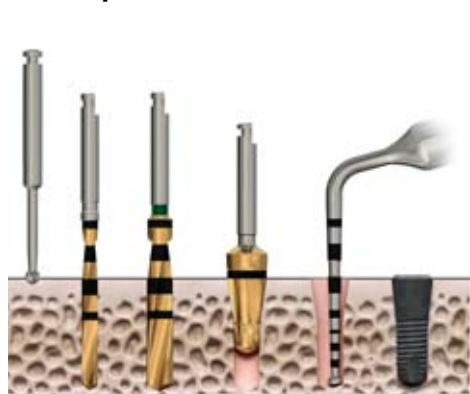

Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa cónica 3,2/5,0 OsseoSpeed™ TX 5,0 13 mm

## OsseoSpeed™ TX 5,0 S

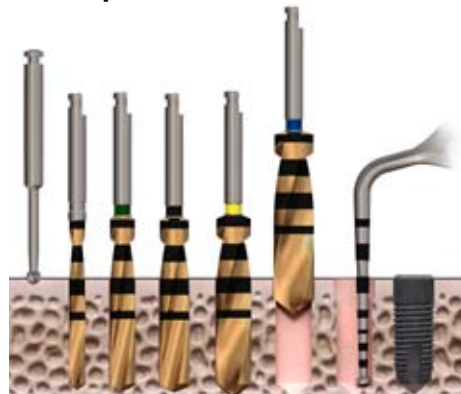

Fresa guía Fresa espiral 2,0 Fresa espiral 3,2 Fresa espiral 3,7 Fresa espiral 4,2 Fresa espiral 4,7 OsseoSpeed™ TX 5,0 S 13 mm