

# Guía de Torques

## Fuerzas de torque recomendadas

Producto		Torque – Ncm	
Tornillo de cierre		 Manual*	 Manual*
P. Cicatrización Estético P. Cicatrización Recto Tapa ProHeal		Manual*	Manual*
TempDesign™ Pilar Temporal  Pilar Recto Pilar Cresco™ 45°		 15	 15
Tornillos de retención Tornillo de retención Cresco™		15	15
ZirDesign™ TiDesign™ CastDesign™ Pilar Sobrecordable Pilar Angulado		 20	 25
Pilar Directo Pilar Bola Pilar Locator™		 25	 25

\*Sólo fuerza digital ligera (5–10 Ncm) utilizando un destornillador manual. No utilizar la llave de torque o carraca.