

Guía de envío y de articuladores

Envío

Utilice siempre cajas de envío Atlantis™ CaseSafe cuando envíe casos a Astra Tech para asegurar el procesamiento eficiente de su solicitud. Dependiendo de la solicitud, será necesario que incluya elementos específicos adicionales en la caja de envío Atlantis™ CaseSafe.

Qué incluir cuando se envían casos de pilares Atlantis a Astra Tech:

Casos con 1-3 espacios edentulos adyacentes, incluir:

Modelo maestro articulado con réplicas en posición.
Registro de mordida (recomendado).
Modelo de tejido blando (recomendado).

Casos con 4 o más espacios edéntulos adyacentes, incluir:

Modelo maestro articulado con réplicas en posición.
Registro de mordida (recomendado).
Modelo de tejido blando (recomendado).
Encerado diagnóstico removible en el modelo maestro.

Casos de arco completo, incluir:

Modelo maestro articulado con réplicas en posición.
Placa con rodetes o placa de registro (recomendado).
Modelo de tejido blando (recomendado).
Encerado diagnóstico removible en el modelo maestro.

Nota: los elementos del caso deben desinfectarse con anterioridad al envío.



Solicite cajas de envío Atlantis™ CaseSafe a su especialista de laboratorio de Astra Tech.

Articuladores

La piedra angular de toda restauración es el registro de las relaciones intermaxilares. Un registro de mordida apropiado asegurará el mejor resultado final posible para el paciente.

Todos los casos deben estar articulados cuando son enviados a Astra Tech. Asegúrese de verificar que la oclusión de los modelos es fiel. Para casos unitarios y poco complicados puede utilizarse un posicionador de modelos (ocludador).

Ceramco Vertex Ocludator plástico



Ray Foster Apex o similar

Debe caber en la caja de envío Atlantis™ CaseSafe



Todos los casos deben estar articulados. Para casos extensos o complicados, en Astra Tech disponemos de los articuladores que aparecen más abajo.

Nota: si utiliza uno de estos articuladores con platinas removibles, sólo será necesario remitir los modelos montados en la platina y no el articulador entero.

Artex
Platinas magnéticas



Denar
Platinas atornilladas o magnéticas



Dentatus
Platinas atornilladas



Hanau
Platinas atornilladas



Kavo Protar 3
Platinas magnéticas



Panadent
Platinas magnéticas



Sam 3
Platinas atornilladas o magnéticas



Stratus 200
Platinas atornilladas o magnéticas



Whip Mix
Platinas atornilladas

