



Procedimiento quirúrgico Facilitate™


Preparación

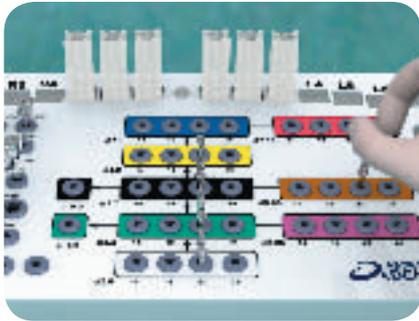

1. Siga detalladamente el protocolo de fresado e instalación y coloque los implantes y las fresas indicados en sus posiciones respectivas.

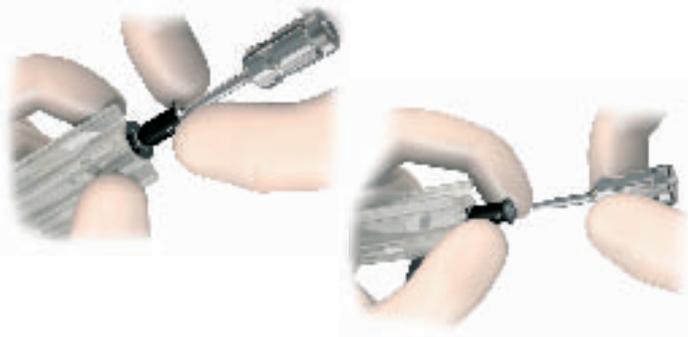


2. Coloque los transportadores de implante indicados en el protocolo en los implantes correspondientes. Vuelva a colocar los implantes en su posición en la bandeja.

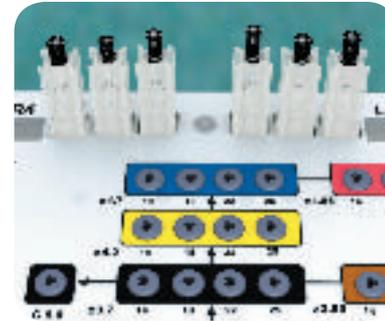

3. Asegúrese de que la guía está correctamente colocada, preferiblemente usando un índice de mordida realizado en articulador.

Mucotomía

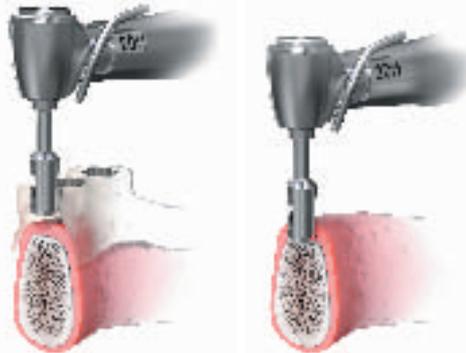

4. Si procede, realice una incisión en los tejidos blandos con el punch mucoso RA. Si fuera necesario, retire la guía y complete las incisiones con el punch, con un bisturí o con otro instrumento apropiado. Si la guía no es mucosoportada, realice la incisión adecuada antes de colocarla.

Fresado




5. Utilice el índice de mordida y recolocque la guía. Fíjela con los tornillos de fijación.



6. Siga el protocolo de fresado e instalación detalladamente, seleccione las fresas y llaves de fresado indicadas. Introduzca la punta de la fresa en la llave de fresado antes de empezar a fresar. Realice el fresado a un máximo de 1.500 rpm y bajo irrigación profusa hasta que el tope de la fresa contacte con la llave.

Instalación del implante

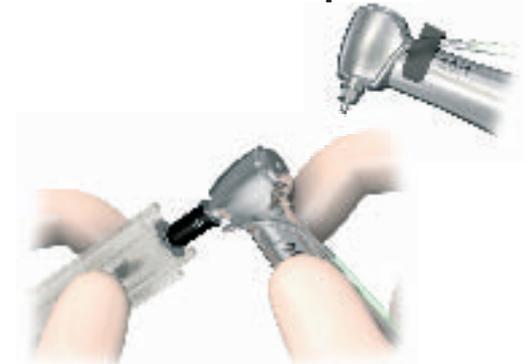

7. Introduzca el driver, colocado en el contraángulo, en el transportador para proceder a la instalación del implante.

Procedimiento quirúrgico Facilitate™

Instalación del implante



8. Realice la instalación a 20 rpm bajo irrigación profusa. El torque recomendado es de 35 Ncm.



9. Continúe con la instalación hasta que el tope del transportador de implante llegue a la guía. Retire el contraángulo con el driver y no retire el transportador hasta que haya instalado el resto de implantes.

Retirada de la guía



10. Cuando todos los implantes estén instalados, afloje los tornillos de los transportadores. Si fuera necesario, utilice la llave de contratorque para evitar que los implantes roten.



11. Cuando haya aflojado todos los transportadores, extraiga los tornillos de fijación y retire la guía.

Cicatrización

Carga inmediata



12. Si algún transportador de implante queda retenido puede retirarlo individualmente, tirando de su tornillo, utilizando la terminación en forma de horquilla de la llave de fresado 3,7mm.



13. Si fuera necesario, puede retirar completamente el transportador utilizando el extractor de transportador; atorníllelo en sentido de las agujas del reloj hasta que el transportador salga fuera del cilindro de la guía.



14. Cuando haya retirado la guía, instale los pilares de cicatrización, suture si fuera necesario, o realice un procedimiento de carga inmediata.